

• È UN NUOVO TIPO DI
IMMOBILIZZAZIONE
COMPLETAMENTE
DIFFERENTE DAI METODI
TRADIZIONALI

• TRASPIRANTE

• È FABBRICATO CON
LA MIGLIORE TECNOLOGIA
MEDICALE ESISTENTE



CE Classe I
CND M030599

TUBICAST®

THE BIRTH OF THE NEW PROGRESSIVE CAST

A.M.E.

www.tubicast.com

 **ASTRO MEDICAL** 2000 s.r.l.


Distribuito in Italia da:
Centro "Torri Bianche" n.1 - 20059 Vimercate (MILANO)
Tel. 039 / 688.00.05 (4 linee r.a.) - Fax 039 / 688.00.07
Web: www.astromedical2000.com
E-mail: info@astromedical2000.com




www.tub

TUBICAST È LA PRIMA IMMOBILIZZAZIONE "A MAGLIA" SVILUPPATA NEL MONDO


- PERMETTE LA **CIRCOLAZIONE DELL'ARIA E DELL'ACQUA** ED È POSSIBILE FARE LA **DOCCIA O IL BAGNO**
- È MOLTO **FLESSIBILE** ED HA UNA **ELASTICITÀ DIFFERENZIATA** PER ADATTARSI PERFETTAMENTE ALL'ANATOMIA DELL'ARTO DA IMMOBILIZZARE EVITANDO COMPRESIONI INDESIDERATE. PUÒ RIDURRE IL RISCHIO DI:
 - STASI VENOSA
 - STASI LINFATICA
 - DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE
 - PIAGHE DA DECUBITO
- È **RINFORZATO** SULL'ESTREMITÀ DELL'ARTO INFERIORE PER MEGLIO SOPPORTARE UN CARICO ADEGUATO
- HA UN'ECCELLENTE **RADIOTRASPARENZA**
- È MOLTO LEGGERO
- È FACILE DA APPLICARE E RICHIEDE **TEMPI MOLTO BREVI**
- È FACILE DA SMALTIRE IN QUANTO **NON CONTIENE FIBRA DI VETRO**

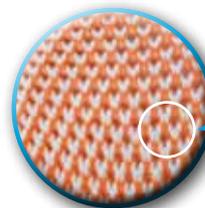

FORI DI VENTILAZIONE

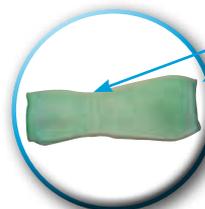

ELASTICITÀ DIFFERENZIATA

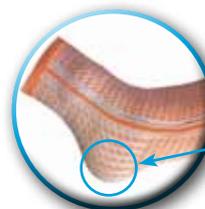

RINFORZO



TRATTAMENTO PARZIALE DELLE FERITE E DEI DISTURBI DELLA PELLE



Durante l'immobilizzazione, è possibile trattare localmente ferite o gonfiore attraverso una semplice incisione sul Tubicast.

- 1 Segnare la parte interessata.
- 2 Tagliare la parte segnata sui tre lati.
- 3 Tagliare la maglia sottogesso.
- 4 Aprire l'area di incisione, medicare e coprire con una benda.
- 5 Richiudere l'area interessata.
- 6 Fissare con nastro adesivo.



COMPOSIZIONE

Tubicast è un combi set costituito da una maglia tubolare interna in poliolefine acqua-resistente



ed una maglia esterna in poliestere imbevuta di resina poliuretanic



Prodotto monouso. Conservare in luogo asciutto a 24 gradi.

Latex free / No-ftalati

INDICAZIONI

Tubicast può essere utilizzato nel trattamento delle fratture degli arti superiori ed inferiori.

Tubicast indurisce in 2-3 minuti.


ISTRUZIONI DI UTILIZZO PER ARTO SUPERIORE



1) Inserire il pollice nel foro della maglia sottogesso e srotolare senza tirare fino a coprire la parte da immobilizzare.



2) Indossare i guanti ed immergere il Tubicast in acqua a temperatura ambiente (3-4 secondi), allargando il più possibile ed eliminare l'acqua senza strizzare

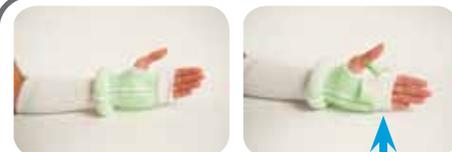

3) Posizionare il Tubicast mantenendo in asse con il pollice la linea di taglio. Avvolgere la mano ripiegando il Tubicast e facendo una lieve pressione



4) Piegarla maglia sottogesso sul Tubicast.



5) Srotolare e ripiegare la maglia sottogesso sulla parte superiore del Tubicast facendo una lieve pressione



6) Modellare immergendo prima le mani in acqua



TUBICAST®

ISTRUZIONI DI UTILIZZO PER ARTO INFERIORE



1) Inserire la maglia sottogesso e srotolarla lungo l'arto da immobilizzare senza tirare. Posizionare la linea guida sul dorso del piede facendo attenzione a non creare pieghe



2) Indossare i guanti ed immergere il Tubicast in acqua a temperatura ambiente (3-4 secondi), allargando il più possibile ed eliminare l'acqua senza strizzare



3) Posizionare il Tubicast dalla parte inferiore delle dita lasciando un margine di 2-3 cm. della maglia sottogesso. Ripiegare quest'ultima facendo una leggera pressione



4) Srotolare il Tubicast



5) Ripiegare la maglia sottogesso facendo una lieve pressione



6) Modellare immergendo prima le mani in acqua

CODICI	MISURE	DESCRIZIONE	CONF.
T325 SA	3" x 25 cm.	AVAMBRACCIO (SHORT ARM)	20PZ
T335 SL	3" x 35 cm.	GAMBALETTA (SHORT LEG)	20PZ
T340 LA	3" x 40 cm.	BRACCIO (LONG ARM)	20PZ
T345 XSL	3" x 45 cm.	GAMBALETTA EXTRA (SHORT LEG EXTRA)	20PZ
T355 LL	3" x 55 cm.	GAMBALE (LONG LEG)	20PZ
T435 SA	4" x 35 cm.	AVAMBRACCIO (SHORT ARM)	20PZ
T450 SL	4" x 50 cm.	GAMBALETTA (SHORT LEG)	20PZ
T455 LA	4" x 55 cm.	BRACCIO (LONG ARM)	20PZ
T475 LL	4" x 75 cm.	GAMBALE (LONG LEG)	20PZ
T555 SL	5" x 55 cm.	GAMBALETTA (SHORT LEG)	20PZ
T590 LL	5" x 90 cm.	GAMBALE (LONG LEG)	20PZ