

# EasyPRP KIT GUIDA ALLA PREPARAZIONE

**Anticoagulante (ACD-A o Citrato di Sodio)**  
1.

**(1)** 1- Prelevare con la siringa Easy PRP 1,5 ml di ACD-A o Citrato di Sodio.

**(2)** 2- Prelevare dal paziente 8,5 ml di sangue usando l'ago a farfalla (butterfly set). (Tirare il pistone fino al livello 10ml).

**(3)** 3- Avvitare il colletto RBC (globuli rossi) nella siringa Easy PRP. Svitare lo stantuffo dalla siringa Easy PRP

**(4)** 4- Ruotare la siringa Easy PRP.

**(5)** 5- Inserire la siringa Easy PRP nella centrifuga. Impostare il programma : velocità: **RCF:1200 G** Tempo: **5 Minuti** premere «START» Inserire il contrappeso nella centrifuga, nel lato opposto alla siringa Easy PRP.

**(6)** 6- Estrarre la siringa dalla centrifuga e riavvitare lo stantuffo. Separare con attenzione il collettore RBC dalla siringa Easy PRP

**(7)** 7- Espellere i globuli rossi in eccesso spingendo il pistone verso il basso.

**(8)** 8- Capovolgere la siringa PRP ed espellere l'aria residua spingendo il contenuto fino alla punta

**(9)** 9- Avvitare il tappo bianco sulla siringa Easy PRP e svitare lo stantuffo.

**(10)** 10- Inserire la siringa Easy PPR e controbilanciarla nella centrifuga. Impostare il programma : Velocità: **RCF:1200 G** Tempo: **10 Minuti** premere «START»

**(11)** 11- Rimuovere la siringa Easy PRP dalla centrifuga e avvitare lo stantuffo. Svitare con cautela il tappo bianco

**(12)** 12- Avvitare l'adattatore e la siringa da 3 ml.

**(13)** 13- Trasferire il PRP nella siringa Easy PRP spingendo dolcemente verso il basso.

**(14)** 14- Il PRP è pronto all'utilizzo

**NOTA BENE:**  
Parte RBC dovrà essere spinto fino alla linea 0 ml= con Buffy Coat  
Tutti RBC rimossi (solo siero chiaro)= senza Buffy Coat (premere lo stantuffo in maniera costante nella siringa Easy PRP premerla con decisione e facendo attenzione per evitare di scaricare troppo RBC )

**NOTE: tenere la siringa EasyPRP in posizione verticale durante la procedura di preparazione PRP**

Distribuito da